



Foot Scan 3D スキャン手順

- ・トリツシヤムをスキャンする場合は、あらかじめ足型の形状を修正しておきます。

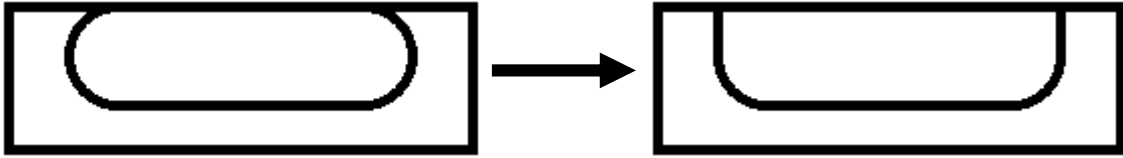



- ・筐体にスキャン用アタッチメントを装着します。
※スキャン結果は左右反転したものになります。

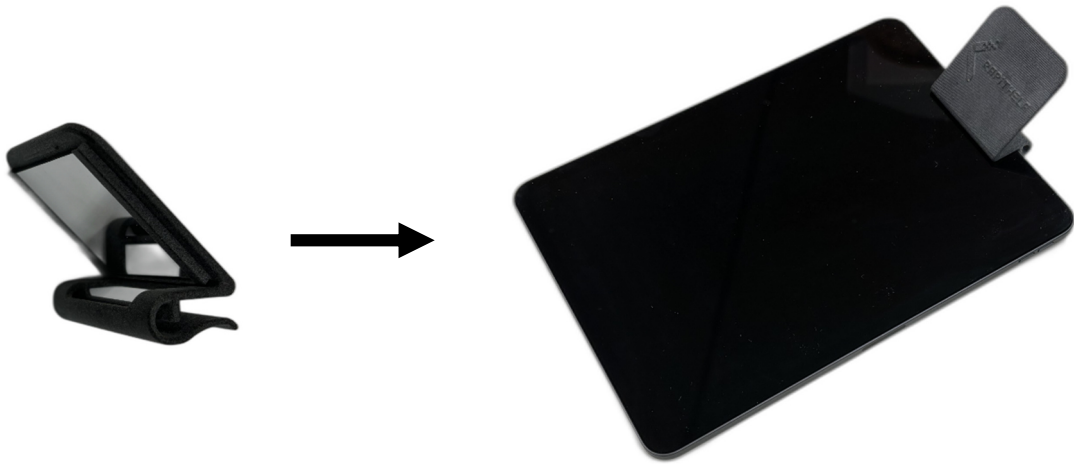


- ・「Foot Scan 3D」を起動します。




- ・スキャン対象の全体像を画面中央に表示し、[赤丸]ボタンをタップします。
- ・スキャン対象を画面中央に表示した状態で、筐体を「中央→左→右→中央→上→下」と動かし、[赤丸]ボタンをタップします。

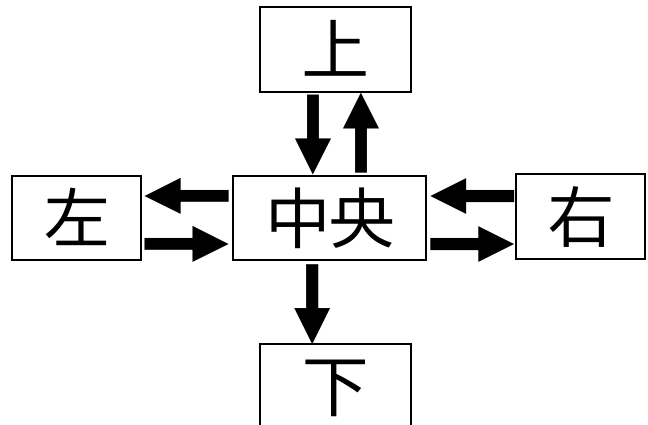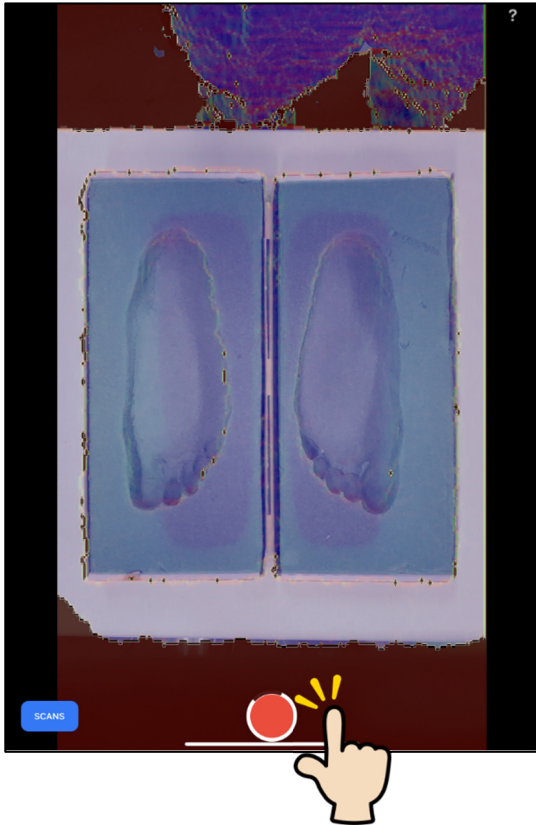

- ・「Process Scan」の[HD]ボタンをタップし、[Start]ボタンをタップします。

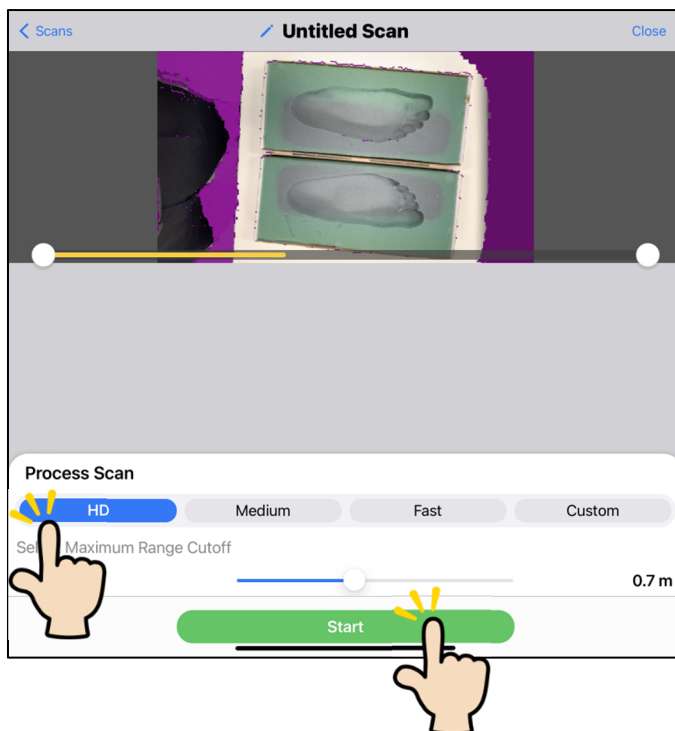

- ・中央上の[Untitled Scan]をタップし、タイトル名を変更します。

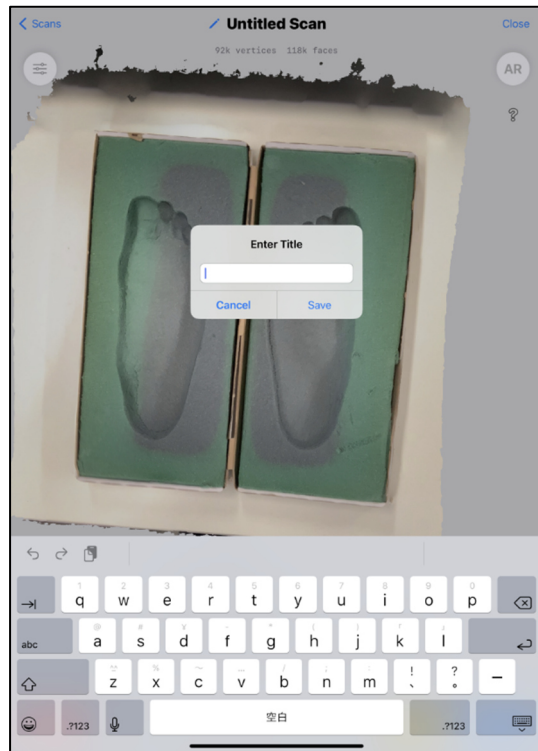

- ・[SHARE]ボタンをタップします。



- ・[Point Cloud]をタップし、[XYZ color]をタップします。
 - ・[Mail]アイコンをタップし、メールを送信します。
- ※STLを使用する場合は、[STL]をメール送信します。

